

DER AKUSTIKER WEISS BESCHIED DRUCKE DIESE ANLEITUNG AUS UND ÜBERGEBE SIE DEINEM AKUSTIKER

Der perfekte Abdruck deines Ohres sorgt für perfekt sitzende In-Ears. Deshalb erhältst Du während des Bestellvorgangs eines unserer maßangepassten und individuell für dich gefertigten In-Ears eine Anleitung für die optimale Abdrucknahme. **DIESE ANLEITUNG GILT FÜR DIE HL2-, HL3-, HL5-, HL6- UND HL7-SERIE.**

Bitte übergebe diese an deinen Akustiker. Solltest Du noch keinen haben, findest Du einen unserer über 2.500 Partnerakustiker in deiner Nähe hier: www.hoerluchs.com/partnerhaendler.

NUR DADURCH, DASS ER NACH DIESER ANLEITUNG ARBEITET UND EXAKTE ABDRÜCKE MACHT, KANN GEWÄHRLEISTET WERDEN, DASS AUCH EXAKTE UND OPTIMALE OTOPLASTIKEN FÜR DEINE IN-EARS GEMACHT WERDEN.

AN DEINEN AKUSTIKER:

Um einen optimalen Sitz und Klang der individuell angepassten In-Ears zu gewährleisten, sind einige wichtige Punkte bei der Abformung zu beachten:


- Bitte verwenden Sie eine Abformmasse mit **möglichst hoher Abformpräzision**. Optimal geeignet hierfür ist die Abformmasse HL SOFT. Ebenfalls gut geeignet sind die Abformmassen Dreve Otoform A und Detax addition nano/supra plus.
- Die Abformung muss die **Concha vollständig und blasenfrei abbilden**. Hierbei ist darauf zu

achten, dass Helix, Crus helicus, Tragus und Antitragus vollständig abgebildet sind.

- **WICHTIG:** Die Länge des abgeformten Gehörgangs muss **mindestens den 2. Gehörgangsknick** abbilden.
- Der Abdruck darf **keinesfalls bearbeitet** oder beschnitten werden
- Die Schalen des Monitorings müssen absolut dicht im Ohr sitzen! Achten Sie deshalb darauf, dass die Abformung **bei geöffnetem Mund** (WICHTIG: keine Kaubewegungen!) durchgeführt wird. Optimale Ergebnisse lassen sich unter Verwendung eines Beißblocks erzielen.
- Bitte senden Sie die Abdrücke an: **Hörluuchs Hearing GmbH & Co. KG, Friedrich-Köchert-Str. 4, 91217 Hersbruck, Deutschland.**
- Bitte vergessen Sie nicht, Ihre **exakten Kontaktdaten** und die **Bestellnummer** beizufügen.

Nur bei der Durchführung der Abformung mit den oben genannten Anforderungen kann ein guter Sitz und Klang gewährleistet werden. Besonders bei Kunden mit Kieferbewegung ist darauf zu achten in jeder Kieferstellung eine optimale Abdichtung zu garantieren, da sich der Klangeindruck sonst ständig verändert.

BEI NICHTBEACHTUNG DER OBEN GENANNTEN PUNKTE KANN LEIDER KEINE GARANTIE AUF DIE PASSFORM UND KLANG GEGEBEN WERDEN. DIE UNTENSTEHENDEN BILDER ZEIGEN EINE ABFORMUNG DIE ALLE GENANNTEN ANFORDERUNGEN ERFÜLLT.

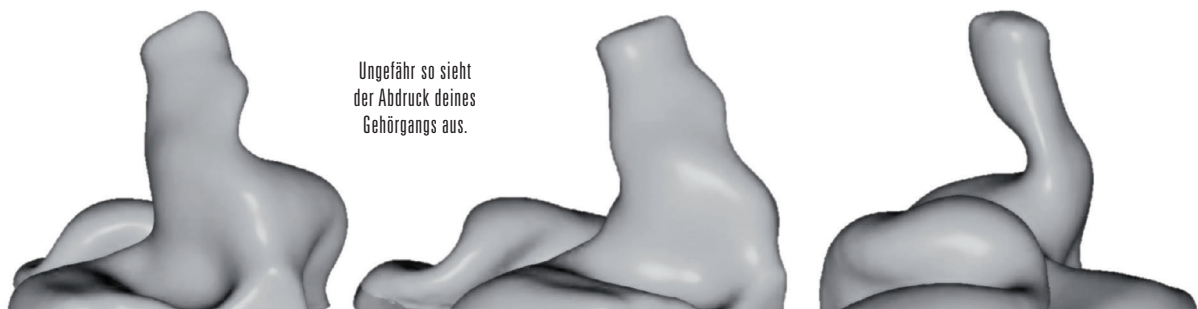

Ungefähr so sieht der Abdruck deines Gehörgangs aus.

HÖRLUCHS HEARING GmbH & Co. KG

FIRMENZENTRALE
Bergseestraße 10, 91217 Hersbruck, Deutschland

LIEFERADRESSE WAREN & AUFTRÄGE
Friedrich-Köchert-Str. 4, 91217 Hersbruck, Deutschland

TEL: +49(0) 9151 / 90 886 -0
FAX: +49(0) 9151 / 90 886 -27
MAIL: unlimited@hoerluchs.com
WEB: www.hoerluchs-unlimited.com

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Thomas Meyer, Norbert Deinhard
HRA 14227, Amtsgericht Nürnberg, Deutschland
USt-Id-Nr.: DE249159172